



Antimikrobiální absorpční měkké silikonové krytí

- Účinné antimikrobiální působení
- Netraumatizuje ránu a okolní kůži
- Vynikající schopnost zvládat tekutiny



Technologie Safetac®

Méně traumatu. Méně bolesti.™

Safetac je patentovaná technologie měkkého silikonu. Krytí s technologií Safetac jsou atraumatická nejen při nošení, ale i během převazu. Tato krytí minimalizují trauma rány, okolní kůže a bolest pacienta. Předcházejí také riziku macerace tím, že utěsní okraje rány a nedovolí tak průsaku exsudátu na okolní kůži.

Pro více informací navštivte www.safetac.cz




Tradiční lepidlo – dochází k strhávání kožních buněk




Safetac - nedochází k žádnému strhávání kožních buněk


Jak Mepilex Ag použít

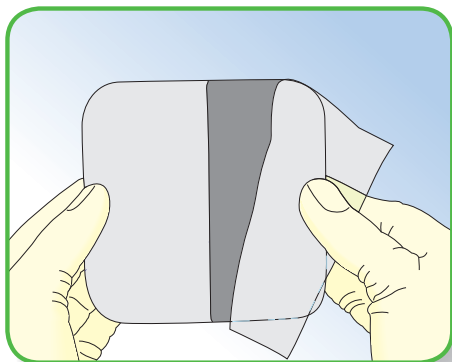

Vypláchněte ránu fyziologickým roztokem nebo vodou s souladu se standardní klinickou praxí. Důkladně osušte okolní kůži.

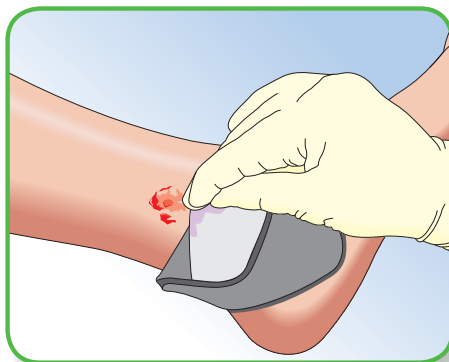

Odstraňte ochranné fólie a přiložte lepící stranou na ránu. Krytí nenapínejte. Pro zajištění nejlepších výsledků by měl Mepilex Ag přesahovat alespoň o 2 cm přes okolní kůži. V případě potřeby lze krytí Mepilex Ag stříhat na požadovanou velikost a tvar.

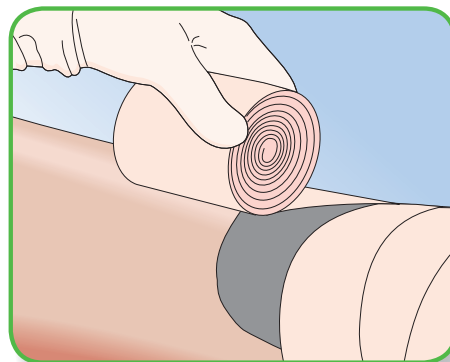

Mepilex Ag můžete případně zajistit obvazem nebo jiným fixačním prostředkem.

Jak Mepilex Ag funguje

Mepilex Ag je antimikrobiální měkké silikonové krytí, které absorbuje exsudát a udržuje v ráně vlhké prostředí. Mepilex Ag do 30 minut deaktivuje patogeny vyskytující se v ráně a jeho účinek trvá až 7 dnů. Tím, že Mepilex Ag snižuje počet mikroorganismů, může také omezit zápach.

Oblasti použití

Mepilex Ag byl vyvinut pro ošetření celé řady slabě až středně exsudujících ran, např. bércové vředy, vředy na chodidlech, dekubity a traumatické rány. Mepilex Ag je možno použít pod kompresními obvazy.

Upozornění

- Nepoužívejte u pacientů s prokázanou přecitlivělostí na stříbro.
- Nepoužívejte Mepilex Ag během léčby ozařováním nebo při některých vyšetřeních, např. rentgenovém či ultrazvukovém vyšetření, při diatermii nebo během magnetické rezonance.
- Nepoužívejte Mepilex Ag zároveň s oxidačními činidly, např. roztoky chlornanů nebo peroxidem vodíku.



Přehled velikostí Mepilexu Ag

Kód VZP	Číslo výrobku	Velikost cm	Ks v balení	Ks v kartonu
0081790	287110	10x10	5	70
	287210	10x20	5	45
	287310	15x15	5	35
	287410	20x20	5	25

Sterilní, jednotlivě balený