


Antimikrobiálne absorbčné mäkké silikónové krytie

- Účinné antimikrobiálne pôsobenie
- Netraumatizuje ranu a okolitú kožu
- Vynikajúca schopnosť zvládať tekutiny

- Absorbuje exsudát
- Prispôsobí sa tvaru tela

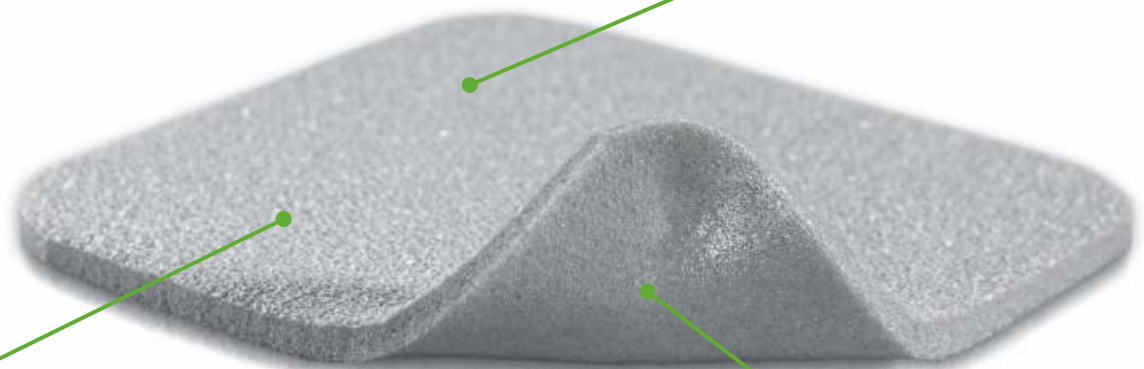

Antimikrobiálna aktivita nastupuje behom 30 minút a trvá až 7 dní

SafetaC[®]
TECHNOLOGY

- Netraumatizuje ranu a okolitú kožu
- Minimalizuje riziko macerácie

Technológia SafetaC[®]


Menej traumatizácie. Menej bolesti[™]

SafetaC je patentovaná technológia mäkkého silikónu. Krytie s technológiou SafetaC nespôsobuje pacientovi traumu pri nosení, ani počas prevážovania. Tieto krytia minimalizujú traumatizáciu rany, okolitej kože a bolesť pacienta. Predchádzajú taktiež riziku macerácie tým, že utesní okraje rany a zamedzí tak presakovaniu exsudátu na okolitú kožu.

Pre viac informácií navštívte www.molnycke.com




SafetaC - nedochádza k žiadnemu strhávanie kožných buniek

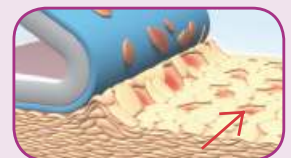


Tradičné lepidlo - dochádza k strhávanie kožných buniek


Ako používať Mepilex Ag

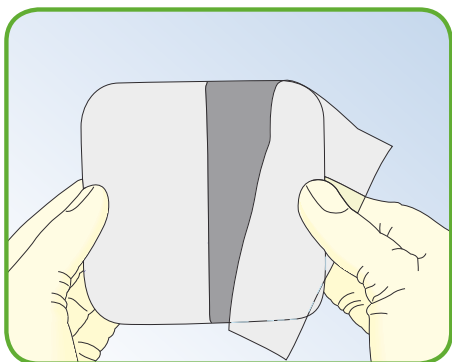

Vypláchnite ranu fyziologickým roztokom, alebo vodou v súlade so štandardnou klinickou praxou. Dôkladne osušte okolitú kožu.

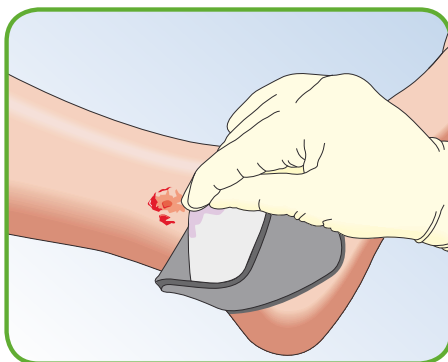

Odstráňte ochranné fólie a priložte lepiacou stranou na ranu. Krytie nenapínajte. Pre dosiahnutie najlepších výsledkov by mal Mepilex Ag presahovať aspoň 2 cm cez okolitú kožu. Ak je to potrebné, môžete krytie Mepilex Ag strihať do požadovaných veľkostí a tvarov.

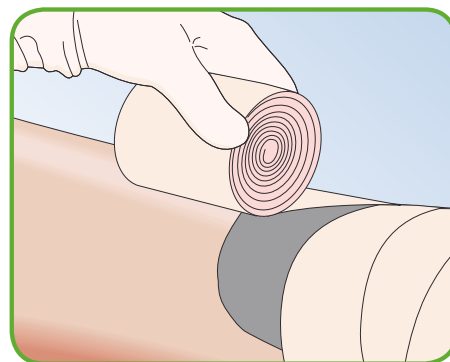

Mepilex Ag môžete zaistiť obvazom, alebo iným fixačným prostriedkom.

Ako Mepilex Ag funguje

Mepilex Ag je antimikrobiálne mäkké silikónové krytie, ktoré absorbuje exsudát a udržuje v rane vlhké prostredie. Mepilex Ag do 30 minút deaktivuje patogény vyskytujúce sa v rane a jeho účinok trvá až 7 dní. Tým, že Mepilex Ag znižuje počet mikroorganizmov, môže taktiež obmedziť zápach.

Oblasti použitia

Mepilex Ag bol vyvinutý na ošetrovanie celej rady slabo a stredne exsudujúcich rán, napr. vredy predkolenia, vredy na chodidlách, traumatické rany. Mepilex Ag je možné použiť pod kompresné obvazy.

Upozornenie

- Nepoužívajte pri pacientoch s preukázateľnou precitlivosťou na striebro
- Nepoužívajte Mepilex Ag počas liečby ožarovaním, alebo pri niektorých vyšetreniach, napr. RTG, ultrazvukové vyšetrenie, magnetická rezonancia alebo diatermia
- Nepoužívajte Mepilex Ag s oxidačnými činidlami, napr. roztoky chloranov alebo peroxidom vodíka



Prehľad veľkostí Mepilexu Ag

Kód ŠÚKL	Číslo výrobku	Veľkosť v cm	KS v balení	KS v kartóne
A79733	287021	6x8,5	5	35
A79735	287121	12,5x12,5	5	50
A79737	287221	10x21	5	45
A79739	287321	17,5x17,5	5	25

Sterilný, jednotlivito balený