

# Mepilex® Border

## Nový vylepšený Mepilex® Border s technologií Safetac®

Několikaleté zkušenosti s krytím Mepilex® Border potvrzují, že se jedná o účinné a spolehlivé samolepící měkké silikonové krytí určené k ošetření mírně až vysoce exsudujících ran. Krytí je vyrobeno pomocí patentované technologie Safetac, díky níž je trauma a bolest při převazech sníženo na minimum.

Inovované krytí Mepilex Border má ještě lepší schopnost zvládat a udržet tekutiny, takže se nemusíte obávat, že dojde k prosáknutí či k maceraci. Nové a vylepšené krytí Mepilex Border má následující výhody:

### Samolepící měkké silikonové krytí

Menší tření v kontaktu s látkami a ložním prádlem zajišťuje bezpečnější fixaci.

Díky průhlednějšímu okraji je krytí diskretnější.

Svrchní film je odolný vůči virům, chrání před vnější kontaminací.

(Splňuje požadavky testu průniku virů ASTM F1671)

Zlepšená schopnost zvládat tekutiny snižuje riziko prosáknutí a macerace.



**Safetac®**  
TECHNOLOGY

Technologie Safetac®. Méně traumatu. Méně bolesti.™

Safetac je patentovaná technologie měkkého silikonu. Krytí s technologií Safetac jsou atraumatická nejen při nošení, ale i během převazu. Tato krytí minimalizují trauma rány, okolní kůže a bolest pacienta. Předcházejí také riziku macerace tím, že utěsní okraje rány a nedovolí tak průsaku exsudátu na okolní kůži.

Pro více informací navštivte [www.molnlycke.com](http://www.molnlycke.com)



Safetac - nedochází k žádnému strhávání kožních buněk



Tradiční lepidlo – dochází k strhávání kožních buněk

## Jak Mepilex Border funguje


Samolepící krytí Mepilex Border účinně absorbuje exsudát a minimalizuje riziko macerace. Krytí udržuje ránu ve vlhkém prostředí, jež je pro hojení rány ideální. Díky vlastnostem technologie Safetac nepocítuje pacient bolest během převazu a při snímání krytí nedochází k traumatu rány či okolní kůže.

## Oblasti použití


Krytí Mepilex Border bylo vyvinuto k ošetření celé řady exsudujících ran, jako jsou:

- Dekubity
- Bércové vředy a vředy na chodidlech
- Traumatické rány

## Použití krytí Mepilex Border

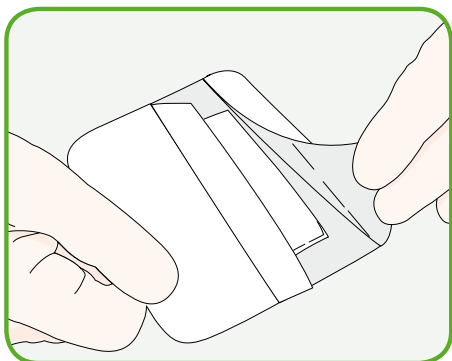

Ránu obvyklým způsobem vyčistěte. Odstraňte ochrannou fólii.

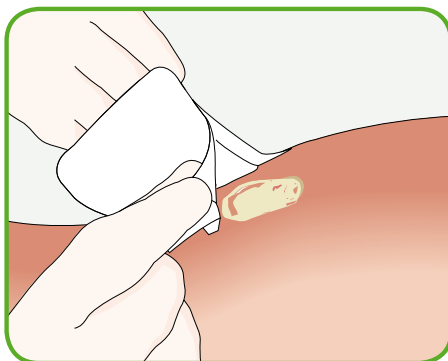

Přiložte krytí lepící stranou na ránu. Nenatahujte.

## Výhody krytí Mepilex Border

- Samolepící
- Nepřilepí se k vlhkému lůžku rány, ale jemně přilne k suché kůži
- Minimalizuje trauma a bolest při převazech
- V závislosti na stavu rány může zůstat na ráně až několik dní
- Udržuje ránu ve vlhkém prostředí
- Minimalizuje riziko macerace
- Zvyšuje pacientovo pohodlí při nošení
- Lze ho použít pod kompresními obvazy

## Poznámka

Vyskytnou-li se klinické příznaky infekce, je nutné před dalším použitím krytí Mepilex Border zahájit odpovídající léčbu.



### Přehled velikostí Mepilexu Border

Kód VZP	Číslo výrobku	Velikost cm	Ks v balení	Ks v kartonu
80717	295200	7,5x7,5	5	70
80718	295300	10x10	5	70
	295400	15x15	5	70
	295600	15x20	5	45
	295800	10x20	5	35

Mölnlycke Health Care, s.r.o.  
Hájkova 2747/22, 130 00 Praha 3  
Tel. +420 221 890 517  
Fax +420 224 817 582  
www.molnlycke.com



MÖLNLYCKE  
HEALTH CARE