

# Lyofoam Max



# Lyofoam Max


Vysoce absorpční  
polyuretanové pěnové  
krytí



# Složení produktu

## Polyuretanová krycí fólie

- propouští vlhkost
- voděodolná

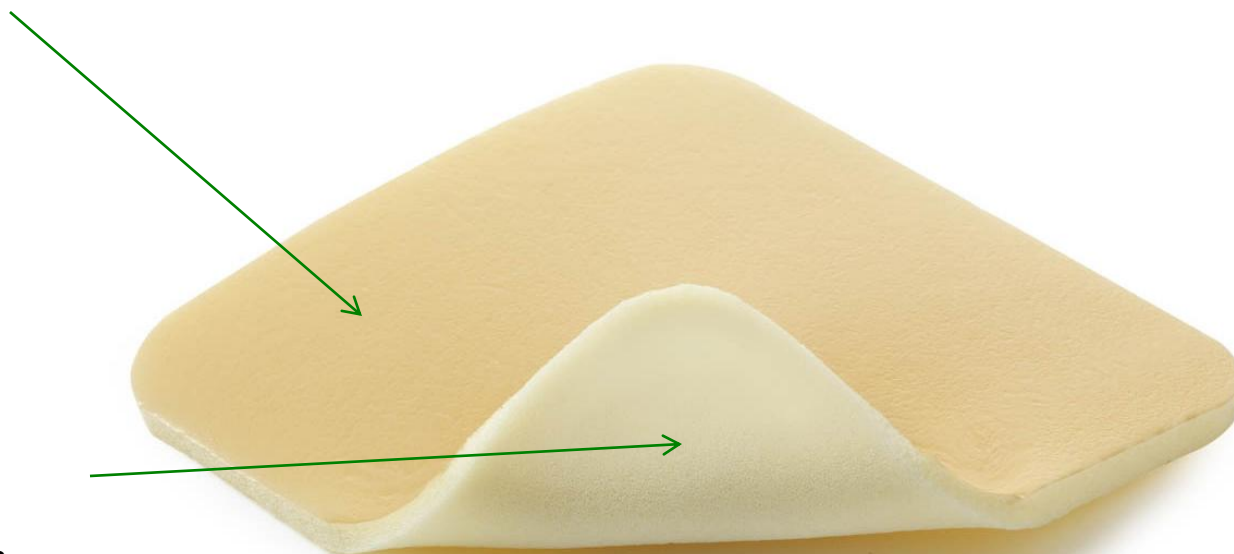

## Hydrofilní polyuretanová pěna

- Vysoká absorpční kapacita a vysoká retenční schopnost
- Použití pod kompresi
- Měkká, pohodlná, snadno se aplikuje i odstraňuje

# Hlavní výhody

- Vysoká savost a schopnost zadržování tekutin
- Snížení rizika macerace, menší možnost úniku tekutin a prodloužení intervalu nošení
- Voděodolná krycí fólie působí jako bariéra proti pronikání virů a bakterií
- Použitelné pod kompresi
- Snadno se aplikuje a odstraňuje
- Měkká a pohodlná, poskytuje komfort pro pacienta
- Nealergizující
- Široká škála rozměrů pro různé typy ran



## Hlavní výhody

Obj. kód	Velikost	Počet ks v balení / kartónu	Cena
603201	10 x 10 cm	10 / 60	82,10
603203	10 x 20 cm	10 / 60	160,00
603204	15 x 15 cm	10 / 70	178,00
603206	20 x 20 cm	10 / 80	300,00




## Oblasti použití

Lyofoam Max je určen pro zvládání středně až silně exsudujících ran jako jsou bércové vředy a proleženiny.


Díky vynikajícímu zvládání exsudátu vytváří v ráně vlhké prostředí pro optimální hojení.




# Jak používat

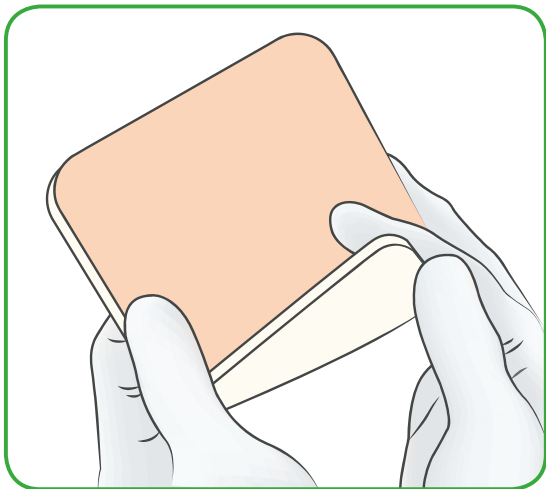

Očistěte ránu a zvolte vhodnou velikost Lyofoam Max.

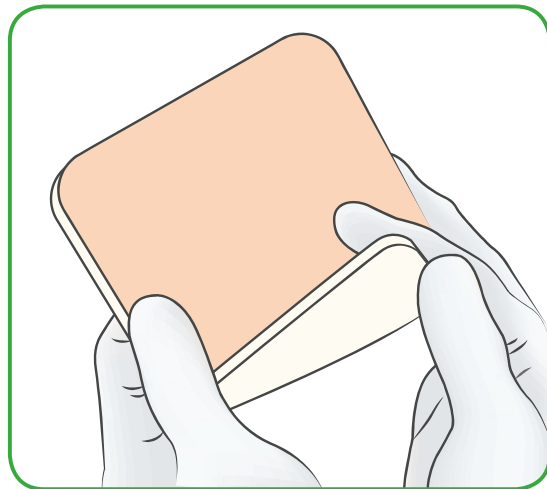

Umístěte krytí pěnovou stranou přímo na povrch rány tak, aby překrývalo okraje rány o cca 2 cm.

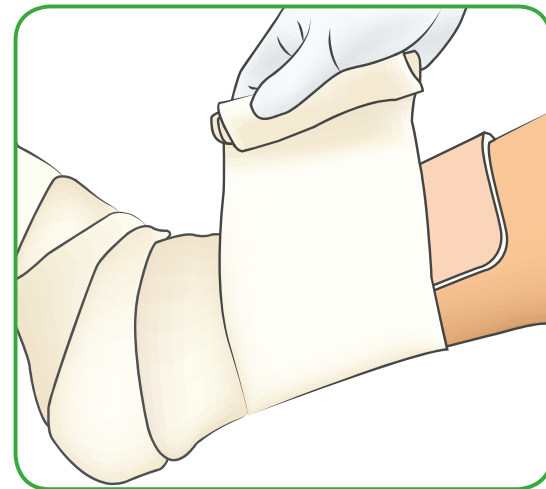

Zafixujte Lyofoam Max vhodným obvazem (Tubifast nebo jiná fixace např. Mefix)

## Skladování

Lyofoam Max by měl být skladován v suchém prostředí do 25°C.


## Doba použitelnosti

- 24 měsíců






# Lepší absorpce

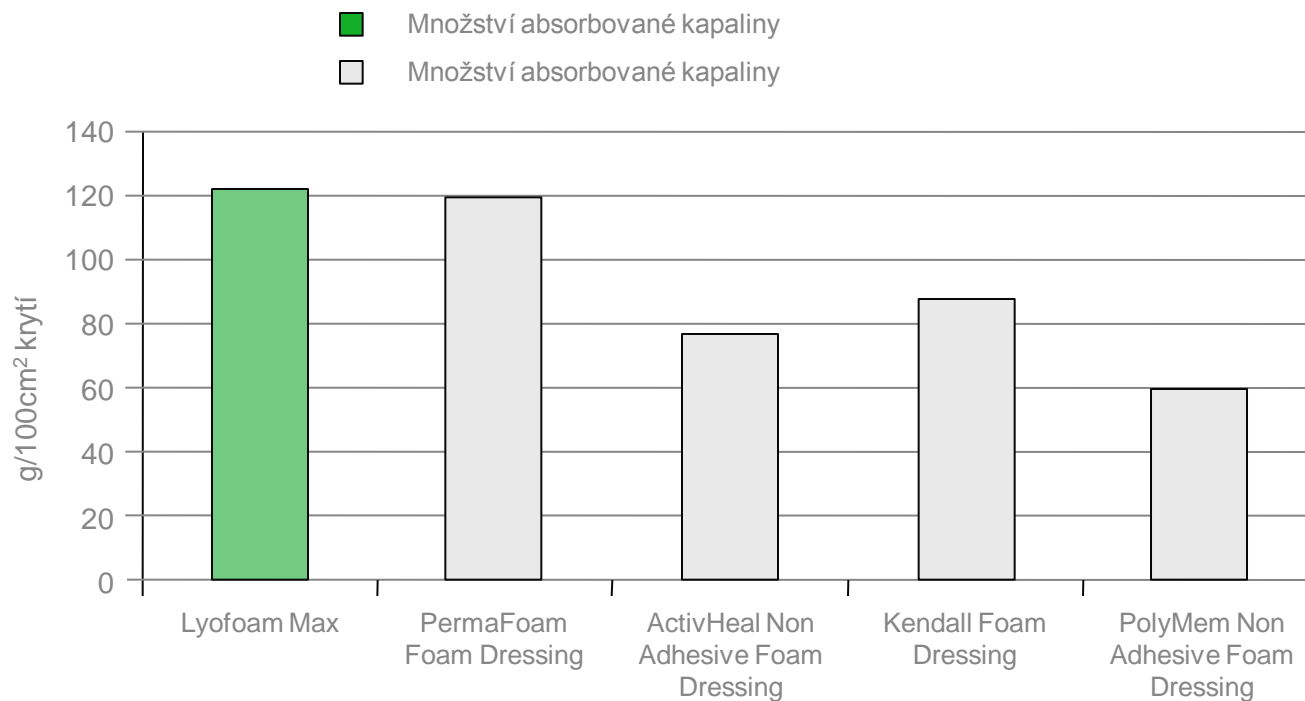

Pozn:

Veškeré testy byly prováděny nezávislou zkušebnou, SMTL ve Velké Británii


# Lepší zvládnání tekutin

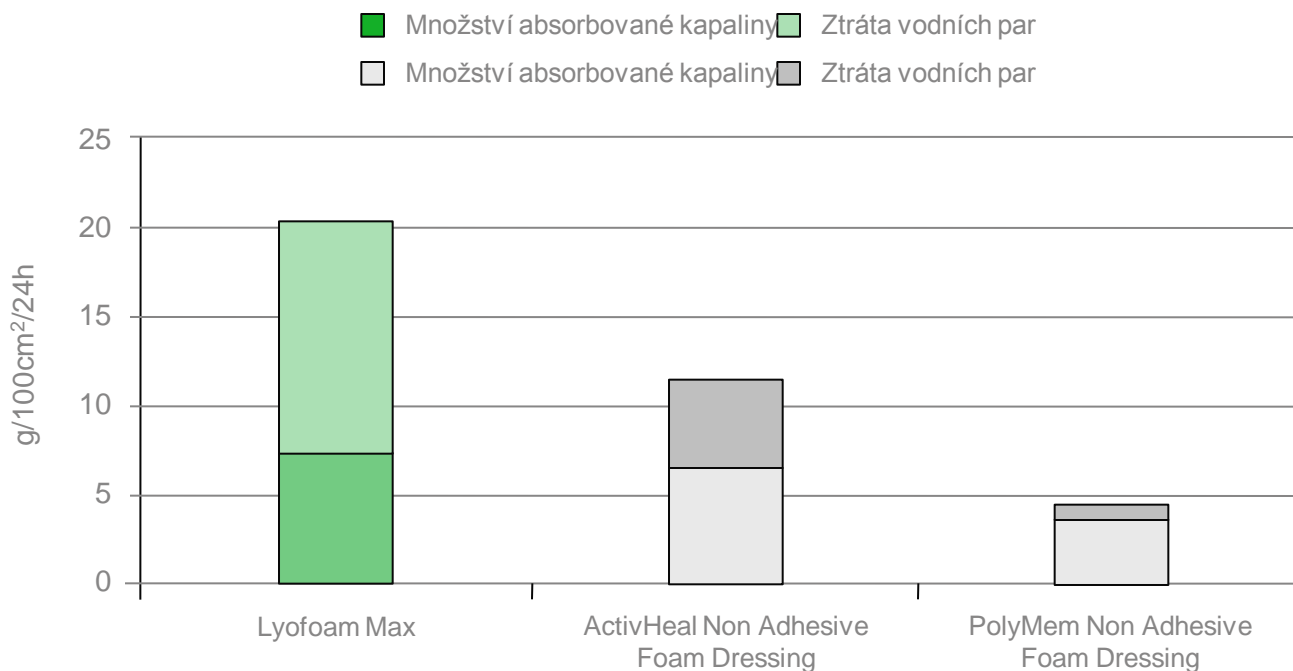

Pozn.:

1. Veškeré testy byly prováděny nezávislou zkušebnou, SMTL ve Velké Británii
2. Pěna Kendall nemá krycí film a proto není možné získat přesná data
3. Krycí Permafoam během testů prosakovalo a proto nebylo možné získat přesná data

# Lyofoam® Max T

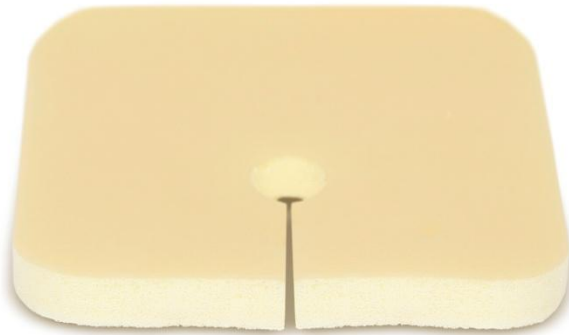

# Lyofoam® Max T

Article code	Size	Pc/RET	Pc/TRP
603207	9x9cm	10	60


Cena: 46,-Kč/ks bez DPH




# Jak používat



Očistěte ránu kolem tracheostomie. Lyofoam Max T aplikujte vždy pouze na suchou oblast.

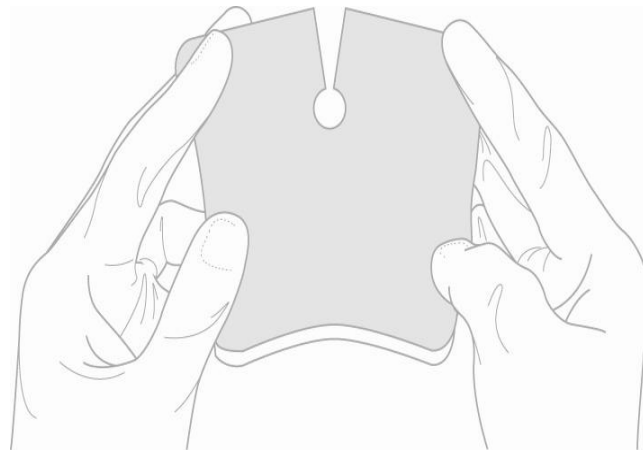

Pozice Lyofoam Max T s připravenou perforací pro tracheostomii.

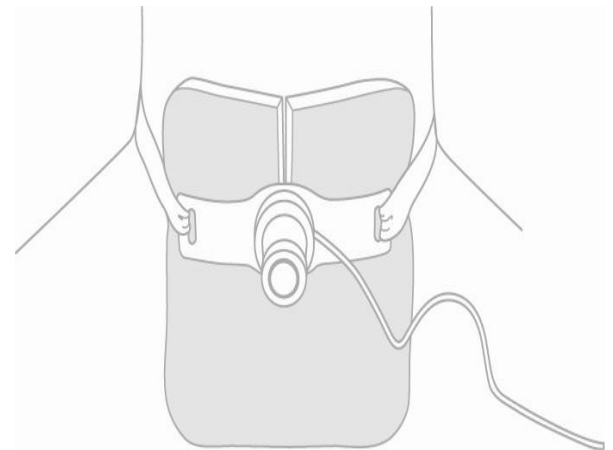

Pokud je nutná fixace, použijte ji především na okrajích krytí Lyofoam Max T.

## Lyofoam<sup>®</sup> Max/T

- vyšší absorpce a lepší retence
- komfortní, měkké
- cenově dostupné

