



Mölnlycke®

Champ de césarienne BARRIER® avec ouverture

- Conception en trois dimensions pour une meilleure couverture
- Poche de recueil intégrée pour une gestion efficace des fluides
- Caoutchouc mousse doux sur les bords de la poche pour la stabilité et un contrôle optimal des fluides
- Adhésif élastique intégré pour une fixation sûre
- Passe-tubulures intégrés pour faciliter l'utilisation des instruments



• Ouverture du film d'incision



BARRIER crée l'effet ricochet à l'origine de meilleurs soins pour plus de patients

Tous les produits BARRIER de Mölnlycke Health Care combinent parfaitement protection, fonctionnalité et confort. Nos solutions novatrices et produits-spécifiques sont complétées avec options de livraison et de logistique, ainsi qu'assistance et formation permanentes. Ces éléments combinés contribuent à créer un effet ricochet à l'origine de gains de temps, d'efforts et d'argent. Les ressources précieuses sont libérées avec, à la clé pour vous, de nouvelles efficacités et la possibilité d'offrir les meilleurs soins à plus de patients.

Instructions



1 Repérez le sens indiqué par le pictogramme. Retirez le feuillet de protection.



2 Centrez le drapage sur le patient.



3 Dépliez d'abord le champ vers vous, puis dans la direction opposée.



4 Dépliez le champ vers les pieds du patient avant de couvrir l'arceau d'anesthésie.



5 Dépliez la poche de recueil.

N de référence	Description	Emballage
65040	Champ de césarienne 175/250x300 cm, film d'incision 38x32 cm, ouverture 18x16 cm, emballé	6/12
694135	Trousse de césarienne 1 housse de mayo 79x145 cm (65x85 cm absorbante) 4 cellduk 18x25 cm 1 OP-tape 9x49 cm 1 champ pour bébé 90x120 cm 1 champ de césarienne 175/250x300 cm, film d'incision 38x32 cm, ouverture 18x16 cm 1 champ de table 150x190 cm (75x190 cm absorbant)	4/8
694140	Trousse de césarienne 4 cellduk 18x25 cm 1 OP-tape 9x49 cm 1 champ pour bébé 90x120 cm 1 champ de césarienne 175/250x300 cm, film d'incision 38x32 cm, ouverture 18x16 cm 1 champ de table 150x190 cm (75x190 cm absorbant)	5/10

Tous les composants spécifiés sont disponibles pour les trousse ProcedurePak®.

Champs opératoires BARRIER

- Matériaux 100% imperméable pour une sécurité optimale du patient
- Pliés de façon optimale et pour un emploi aseptique, utilisables par une seule personne en toute simplicité
- Conditionnement agréable d'emploi avec une boîte distributrice avec des anses